

## LABORATOIRE DES MALADIES RARES ET AUTO-INFLAMMATOIRES

### PROTOCOLE DE PRELEVEMENT ET D'EXPEDITION

Toutes les informations et les **formulaire**s sont **disponibles** sur notre site UMAI  
<https://umai-montpellier.fr/> rubrique diagnostic moléculaire

- 1.** Il n'est pas nécessaire d'être à jeun.
- 2.** Prélever le sang **en début de semaine** sur  
- 1 tube EDTA (7 ml) (tubes à bouchon violet)
- 3.** Agiter doucement les tubes.
- 4.** Marquer le nom et le prénom et la date de naissance sur **chaque** tube.
- 5.** Entourer individuellement les tubes de papier absorbant, les mettre dans un sac plastique, puis les introduire dans une enveloppe matelassée ou un petit carton. Inclure impérativement le dossier de demande d'analyse (contenant la prescription médicale, l'identité du préleveur, le consentement éclairé par prélèvement, la fiche de renseignement clinique par malade, et l'arbre généalogique) et le bon de facturation correspondant.
- 6.** Précisez les coordonnées complètes du médecin prescripteur, qui doit être titulaire, pour l'envoi des résultats
- 7.** Expédier les documents et les tubes (qui doivent être maintenus à *température ambiante*) *dans les heures qui suivent le prélèvement*, par transporteur express en précisant bien le destinataire des échantillons :

Pr Isabelle TOUTOU  
Centre de Gestion des Echantillons Biologiques  
Hôpital Lapeyronie  
371, Av du Doyen Gaston Giraud  
34295 MONTPELLIER Cedex 5  
☎ 04 67 33 58 57  
FAX : 04 67 33 68 68  
Email: [umai@chu-montpellier.fr](mailto:umai@chu-montpellier.fr)